

INFORMATIONS IMPORTANTES: Lors de l'impression, sélectionner «non» pour ajuster la page. Sinon, le ruban de mesure ne sera pas imprimé à la bonne échelle. De préférence, téléchargez le fichier et imprimez sans ajuster la page à partir de Adobe-Acrobat. CONTRÔLE 01: Placez ici une pièce de 1€ afin de vérifier l'échelle de la page imprimée

CONTRÔLE 02: Placez une carte de crédit ou de débit, une carte téléphonique, un permis de conduire européen ou une carte d'assurance maladie dans ce cadre



DE PRÉSERVATIFS MISTER SIZE

TAILLE

s coupants peuvent lors de la découpe.

ATTENTION : des bords se former sur le papier la

## **RUBAN DE MESURE**

Comment déterminer la taille de préservatifs MISTER SIZE qui vous convient



01

## **IMPRIMER & DÉCOUPER**

Une fois l'impression terminée, découper le ruban de mesure **MISTER SIZE** en suivant tout simplement avec des ciseaux la ligne tracée en pointillés.



02

## MESURER

Placer avec soin le ruban de mesure à l'endroit le plus large du pénis en érection et lire simplement la taille recommandée indiquée sur le bord supérieur.



03

## **COMMANDER & PROFITER**

**MISTER SIZE** est disponible en sept tailles différentes et, grâce à la recommandation déterminée, vous avez trouvé votre taille de préservatifs, celle qui vous convient!







LE MEILLEUR POUR FAIRE





















L'AMOUR AVEC PRÉSERVATIF Disponible en boîte de 3, 10 ou 36



**MISTER SIZE** n'existe pas seulement en sept tailles de préservatifs différentes mais aussi en trois tailles de boîtes.

Vous hésitez toujours? Commandez votre boîte d'échantillons contenant 3 tailles de préservatifs à essayer!

